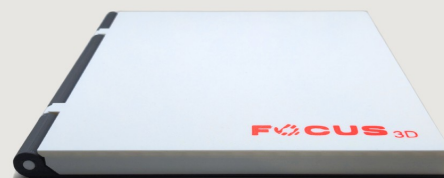
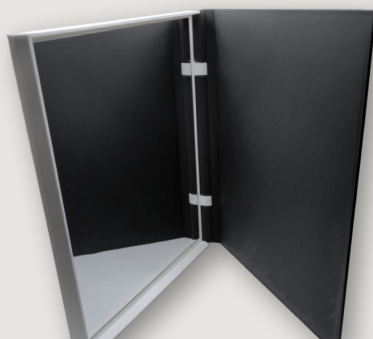


MirrorBook 3D

Codice documento IUMB3D01-IT

Revisione Rev. 0 del 01.07.2025

Modello MB3D-01

**FOCUS 3D**

Via Berlinguer 3 · 42019 Scandiano (RE) · Italia

Tel. (+39) 333 6973608

focus3dhand@gmail.com

INDICE

01 Premessa**03** Riferimenti legislativi**05** Segnalazione/reclamo**07** Categoria dei consumatori ai quali è indirizzato**09** Contenuto della confezione**11** Stato di fornitura**13** Avvertenze e rischi residui**15** Luogo di utilizzo**17** Origine della merce**19** Usi vietati**21** Ricovero per un momentaneo inutilizzo**23** Dichiarazione del fabbricante**02** Responsabilità e garanzia**04** Campo di applicazione**06** Descrizione e/o informazioni generali del prodotto**08** Codice articolo/e e sua identificazione**10** Conservazione (prima dell'uso)**12** Apertura dello strumento**14** Caratteristiche tecniche**16** Accessori/optional**18** Destinazione d'uso/usi consentiti/come utilizzare**20** Manutenzione/pulizia**22** Smaltimento

01 Premessa

Desideriamo innanzi tutto ringraziarvi per avere scelto un prodotto FOCUS 3D.

Le presenti istruzioni sono state realizzate al fine di fornire una conoscenza generale di MirrorBook 3D, e dare le istruzioni d'uso, manutenzione e tutte le notizie ritenute necessarie per il suo BUON FUNZIONAMENTO.

La FOCUS 3D ha la facoltà di apportare variazioni e/o migliorie sulla produzione dei propri articoli e sui contenuti delle presenti istruzioni senza che ciò comporti l'obbligo di aggiornare i prodotti e le istruzioni precedenti.

 I particolari che costituiscono MirrorBook 3D illustrati nelle presenti istruzioni non possono essere intercambiati con altri particolari provenienti da articoli già in possesso del consumatore/rivenditore. Non è garantita intercambiabilità tra forniture diverse.

 Se la vendita non è stata fatta direttamente dalla FOCUS 3D, chi si ravvede come rivenditore/grossista deve consegnare le presenti istruzioni al consumatore finale, nel momento in cui viene conclusa la vendita.

Non asportare, strappare o riscrivere per alcun motivo parti del presente documento.

Conservare le presenti istruzioni insieme alla sua etichetta, per consultazioni future, in un luogo protetto.

Assieme alle presenti istruzioni l'utilizzatore deve conservare il documento comprovante l'acquisto. Rispettare completamente le indicazioni fornite nelle presenti istruzioni, per ottenere il massimo beneficio in completa sicurezza.

Buon allenamento e grazie per avere scelto MirrorBook 3D.

02 Responsabilità e garanzia

Garanzia per eventuali difetti di fabbricazione: **24 mesi**.

Per la sostituzione in garanzia, il prodotto deve essere restituito franco fabbrica, nella sua confezione originale.

La garanzia non copre:

- I prodotti che siano stati modificati senza l'esplicita autorizzazione di FOCUS 3D;
- I prodotti che si sono rotti/danneggiati durante il trasporto;
- I prodotti che sono stati utilizzati impropriamente o per scopi diversi da quelli stabiliti;
- I prodotti nei quali siano state sostituite delle parti con ricambi non originali;
- I prodotti che subiscono un normale degrado/usura dovuto all'uso/tempo.

03 Riferimenti legislativi

Il prodotto rispetta gli obblighi dettati dal Reg. UE n. 2023/988 del 10 maggio 2023 e i materiali utilizzati per la fabbricazione soddisfano i requisiti del Regolamento UE n. 1907/2006 (REACH).

Come identificativo dell'articolo, si ritiene di utilizzare il riferimento al Modello, riportato al Par. 14 — Caratteristiche tecniche.

Ad ogni singolo MirrorBook 3D è attribuito un "numero di serie" / "lotto di fabbricazione" univoco.

04 Campo di applicazione

Le presenti istruzioni si applicano all'elenco dei prodotti citati al paragrafo 8 — Codice articolo/e e sua identificazione.

05 Segnalazione/reclamo

Qualsiasi segnalazione che il consumatore vorrà avanzare (es. reclamo, segnalazione di incidente o problema di sicurezza che abbia coinvolto il prodotto), dovrà essere indirizzata a chi gli ha venduto il prodotto (Fabbrikante/Rivenditore/Grossista) citando il modello ed il numero di serie/lotto indicato sull'etichettatura presente sulla confezione.

Se il reclamo proviene direttamente dal distributore (o rivenditore) dovrà essere indirizzato a FOCUS 3D; se il distributore (o rivenditore) riceve il reclamo dal consumatore, lo stesso deve essere immediatamente segnalato a FOCUS 3D.

06 Descrizione e/o informazioni generali del prodotto

MirrorBook 3D è uno specchio compatto e richiudibile a libro, progettato per attività di mirror therapy dedicate alla mano. È realizzato con materiali resistenti e facilmente pulibili (vedere Par. 20 — Manutenzione/pulizia).

07 Categoria dei consumatori ai quali è indirizzato

MirrorBook 3D è adatto a dei Consumatori di età pari o superiore a 14 anni. Le persone con disabilità devono essere supervisionate durante l'uso.

08 Codice articolo/e e sua identificazione

Cod. MB3D-01

Il prodotto viene identificato tramite un'etichetta applicata sull'imballo primario, riportante il riferimento al modello e al numero di serie/lotto di fabbricazione.

09 Contenuto della confezione

Al ricevimento di MirrorBook 3D controllare che l'imballaggio sia integro e il prodotto non sia danneggiato, verificando che al suo interno siano presenti tutti i componenti, come sotto raffigurato. Se il prodotto risulta danneggiato, incompleto o presenta qualsiasi tipo di anomalia, non utilizzarlo. Rivolgersi al Venditore per la sostituzione.

All'interno della confezione è presente 1 MirrorBook 3D completamente montato, consegnato chiuso a libro.

10 Conservazione (prima dell'uso)

Conservare in un luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore dirette, dai raggi solari e lontano dalla portata dei bambini.

11 Stato di fornitura

Il Prodotto viene fornito completamente montato e chiuso a libro (vedere Par. 9 — Contenuto della confezione).

12 Apertura dello strumento

Non sono necessari utensili.

MirrorBook 3D si apre manualmente a libro fino a ottenere un angolo di circa 90°.

13 Avvertenze e rischi residui

Tenere le confezioni dell'imballo e MirrorBook 3D fuori dalla portata di bambini e animali. In particolare, i sacchetti in cellophane possono rappresentare un rischio di soffocamento.

In caso di caduta di MirrorBook 3D, valutare l'integrità del prodotto prima del riutilizzo. Per qualsiasi dubbio non utilizzare e rivolgersi al Venditore.

L'utilizzatore deve avere cura di operare in condizioni ed in scenari di sicurezza evitando ogni situazione di potenziale pericolo per sé e per gli altri. Rispettare scrupolosamente la destinazione d'uso quivi stabilita, ogni altro uso è VIETATO e quindi considerato improprio.

Persone vulnerabili e/o molto vulnerabili potranno utilizzare il MirrorBook 3D solo se assistiti da un adulto responsabile.

 In caso di dubbi, cioè se ritenete appropriato o meno utilizzare MirrorBook 3D, si raccomanda di consultare un medico o terapeuta prima dell'utilizzo.

 Durante l'uso l'utente potrebbe avvertire mal di testa o affaticamento visivo, dovuti alla prolungata esposizione al riflesso e al tentativo del cervello di integrare informazioni visive e motorie incongruenti.

 Durante l'uso l'utente potrebbe avvertire leggera nausea o senso di disorientamento, soprattutto se l'esercizio è svolto troppo a lungo o in condizioni di scarsa illuminazione.

 Durante l'uso l'utente potrebbe avvertire fatica muscolare o mentale, legata alla concentrazione richiesta per eseguire movimenti guidati dal riflesso.

14 Caratteristiche tecniche

Marchio	FOCUS 3D
Modello	MB3D-01
Prodotto	MirrorBook 3D
s.n./Lotto	Vedi etichettatura
Dimensioni prodotto chiuso	Lunghezza: 22,3 cm; Larghezza: 21 cm; Spessore: 1,8 cm
Dimensioni prodotto aperto a libro	Larghezza: 31 cm; Altezza: 21 cm
Imballo primario	Scatola 25×25×5 cm
Materiale delle parti in plastica (pannello superiore e inferiore)	PLA per stampa 3D. Filamento PLA di alta qualità realizzato con risorse vegetali rinnovabili come l'amido di mais, biodegradabile, che offre leggerezza e sostenibilità
Materiale cerniera centrale	Alluminio Tondo 0,6 cm
Materiale specchio	Acrilico ad alta riflettività (non vetroso, resistente e sicuro)
Colore	A scelta del cliente <i>(i colori possono essere suscettibili di variazioni senza preavviso non essendo gli stessi sinonimo di qualità, ma semplicemente scelte estetiche)</i>
Peso prodotto	300 g
Temperatura massima di utilizzo	+35 °C
Temperatura minima di utilizzo	+10 °C
Umidità (senza condensazione)	Max 80%

15 Luogo di utilizzo

Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari e il contatto con fonti di calore come stufe, forni o termosifoni, per prevenire un invecchiamento precoce dei materiali o in talune condizioni anche un loro danneggiamento che li potrà rendere inutilizzabili.

16 Accessori/optional

Non sono presenti accessori/optional.

17 Origine della merce

Prodotto di origine Italiana.

18 Destinazione d'uso/usi consentiti/come utilizzare

Il prodotto non è un dispositivo medico e nemmeno un giocattolo ed è destinato esclusivamente a scopi ludici-educativi di allenamento e benessere personale e non per scopi professionali.

MirrorBook 3D sfrutta l'effetto specchio per proporre esercizi visuo-motori con la mano dominante, creando l'illusione ottica che la mano nascosta stia compiendo il movimento. Questa illusione può attivare schemi motori utili all'allenamento personale della coordinazione, propriocezione e percezione del movimento.

Ideale per:

- Atleti che desiderano migliorare la coordinazione;
- Musicisti che necessitano di maggiore destrezza e velocità nelle mani;
- Chiunque voglia migliorare la coordinazione e la destrezza delle dita delle mani per hobby, sport o benessere personale.

Per l'uso posizionare MirrorBook 3D su una superficie piana e stabile, aprendolo a libro verticalmente fino a ottenere un angolo di circa 90°. Disporre la mano dominante davanti allo specchio, visibile all'utente, e posizionare la mano non dominante dietro il pannello inferiore, nascosta alla vista.

Iniziare l'attività motoria seguendo con lo sguardo i movimenti riflessi della mano visibile, lasciando che l'illusione guidi la percezione del movimento simmetrico.

L'utilizzo è consigliato per sessioni brevi (5–15 minuti), con pause in caso di affaticamento visivo o sensazione di disagio.

Per garantire nel tempo la sua fruibilità è necessario eseguire una pulizia regolare, in particolare prima di riporlo in attesa di un successivo riutilizzo (vedere Par. 14 — Caratteristiche tecniche).

19 Usi vietati

È vietato:

- Sottoporre la struttura a carichi, pesi o pressioni meccaniche non previste.
- Forzare lo snodo centrale con movimenti di torsione e oltre il limite di apertura standard (circa 180°).
- Impiegare lo strumento per esercizi non pertinenti alla coordinazione e destrezza manuale.
- Usarlo in presenza di fratture / lussazioni recenti e instabili alla mano, al polso o all'avambraccio.
- Usarlo in presenza di dolore, infiammazione o altre sintomatologie mediche, alla mano, al polso o all'avambraccio senza un parere medico o di un terapeuta.
- Usarlo in fase iniziale post-chirurgica alla mano, al polso o all'avambraccio.
- Usarlo a contatto diretto con ferite/tagli, infezioni cutanee, dermatiti o danneggiamenti dell'epidermide.
- Usarlo con la sindrome del tunnel carpale non trattata o sintomatica.
- Usarlo in qualsiasi condizione in cui l'uso può provocare disagio, dolore o peggioramento dei sintomi.
- L'uso da parte di persone affette da patologie neurologiche e/o reumatiche senza un parere medico o di un terapeuta.
- Usarlo in presenza di dolori, formicolii, perdite di forza o sensibilità improvvise.
- Esporlo ai raggi diretti del sole, **fonti di calore, fiamme libere o umidità eccessiva**, poiché potrebbe deformarsi o deteriorarsi.
- Modificare le parti di cui è costituito il prodotto o sostituire parti di esse, direttamente da parte dell'utilizzatore.
- Usarlo per scopi diversi da quelli previsti.
- Mantenerlo in condizioni igieniche inadeguate.
- Usarlo come dispositivo medico.
- Usarlo come giocattolo e lasciarlo alla portata dei bambini.
- Lasciare il prodotto alla portata di animali per evitare il rischio di danneggiamenti o incidenti sugli stessi.

20 Manutenzione/pulizia

Pulire la superficie riflettente con un detergente idoneo per superfici acriliche e un panno morbido e non abrasivo. Evitare prodotti o strumenti che possano graffiare la superficie.

Pulire le parti in plastica con un panno umido dopo l'utilizzo.

Non lavare in lavastoviglie, non usare acqua sopra i 40°C, non asciugare con fonti di calore dirette.

Se siete nella necessità di sostituire delle parti del prodotto vi dovete rivolgere a chi ve l'ha venduto; non improvvisare riparazioni di fortuna o posticce.

21 Ricovero per un momentaneo inutilizzo

Prima di riporre il prodotto, assicurarsi che sia stato pulito (vedi Par. 20 — Manutenzione/pulizia).

Conservare il prodotto in un luogo asciutto, lontano dall'umidità e da fonti di calore dirette, per mantenerne l'integrità nel tempo.

22 Smaltimento

MirrorBook 3D deve essere smaltito secondo le regole vigenti nel luogo di utilizzo considerando le composizioni dei materiali indicati al par. 14 — Caratteristiche tecniche.

23 Dichiarazione del fabbricante

FOCUS 3D dichiara che il prodotto:

- denominato: MirrorBook 3D,
- modello: MB3D-01,
- s.n./lotto: tutti,

è conforme:

- al Regolamento UE n. 2023/988, ritenendolo "sicuro", essendo solo presenti rischi minimi compatibili con l'uso, considerati accettabili e coerenti con l'elevato livello di protezione della salute e sicurezza dei consumatori;
- al Regolamento UE n. 1907/2006, relativo alla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH); in base a tale Regolamento FOCUS 3D è un produttore di "articoli" e non fabbrica sostanze o preparati (i nostri articoli non comportano il rilascio intenzionale di sostanze).



Il numero di serie/lotto di MirrorBook 3D è riportato sull'etichetta applicata sulla confezione.

Conserva la confezione, o comunque l'etichetta con questo numero: potrebbe servirti per eventuali richieste a FOCUS 3D durante la validità del periodo di garanzia.

Si consiglia anche di tenere allegate le presenti istruzioni alla documentazione comprovante l'acquisto.

FOCUS 3D di Camilla Campani · Via Berlinguer 3, 42019 Scandiano (RE), Italia

focus3dhand@gmail.com · Tel./WhatsApp +39 333 6973608

Cod. IUMB3D01-IT Rev. 0 del 01.07.2025